


MODE D'EMPLOI

Le test sérologique des Anticorps Coronavirus MyCovidiag® est un kit de test de prélèvement et prêt à l'envoi, pour confirmer la présence d'anticorps contre le SARS-CoV2 responsable de la Covid-19. L'échantillon est analysé in vitro dans notre laboratoire de diagnostic spécialisé partenaire.

**FLASHEZ POUR LIRE LE
MODE D'EMPLOI COMPLET**

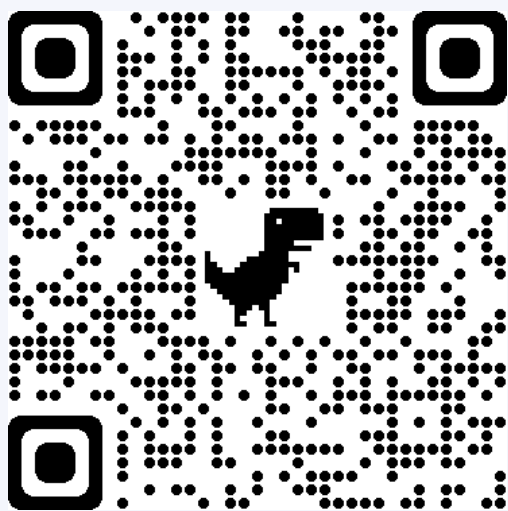

Ou sur notre site [www.mycovidag.fr/mode d'emploi](http://www.mycovidag.fr/mode-d'emploi)

VOTRE KIT DE PRELEVEMENT CONTIENT

- 1 kit hygiène de prélèvement
- 1 tube de prélèvement sanguin (Microvette CB300)
- 2 dispositifs d'auto-prélèvement sécurisé, (lancette LSLITE)
- 1 Mode d'emploi du kit de prélèvement

VOTRE KIT DE TRANSPORT CONTIENT

- 1 Emballage retour carton
- 1 Sachet de retour en plastique,
- 1 Papier absorbant,
- 1 Attestation sur l'honneur
- 2 Etiquettes à coller

CONTACTEZ NOUS

70 rue du Dr Yersin
59120 Loos - France
03 28 55 51 29
contact@mycovidag.fr

Si le coffret est incomplet, si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, veuillez nous contacter au coordonnées ci-dessus

V1.3.1



INFORMATION D'UTILISATION

Les échantillons doivent être prélevés exclusivement entre le lundi et le mercredi (au plus tard) et envoyés le jour même. Veuillez tenir compte des jours fériés.

Malheureusement, il n'est pas possible d'analyser les échantillons sanguins d'un volume inférieur à 0,3 ml (le tube doit être rempli jusqu'au bas des ailettes).

Consulter votre médecin avant d'utiliser ce coffret si :

- Vous présentez une maladie contagieuse transmissible par le sang
- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez
- Si vous présentez un trouble de la coagulation ou si vous prenez des anticoagulants


Le coffret doit être utilisé sur des individus majeurs selon l'utilisation décrite dans la notice complète présente sur notre site internet www.mycoviddiag.fr

Conserver le coffret hors de portée des enfants.



Lavez vous les mains à l'eau chaude (maximum 40°C) pendant 30 à 45 secondes.

Essuyez le bout du doigt à prélever avec le tampon alcoolique présent dans le kit hygiène de prélèvement.

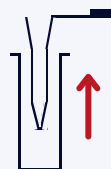

Déclipsez la Microviette du tube et séparez l'embout de fermeture du bouchon clapet. Il servira à refermer le tube par la suite

Tournez le capuchon de la lancette et tirez pour l'ouvrir.



Attention : Si le capuchon est manquant ou mal mis n'utilisez pas la lancette.



Positionnez la lancette sur la partie extérieur de la pulpe de l'annulaire ou du majeur (cf schéma ci-contre)

Veillez à bien rester sur la pulpe et à ne pas vous piquer trop près de l'ongle.

Activez la lancette en appuyant sur le bouton latéral et massez doucement votre doigt de la paume vers la pointe afin de former une goutte




Positionnez vous debout pendant la durée du prélèvement, la main au niveau de votre bassin

Positionner la Microviette à l'horizontale, perpendiculairement à votre doigts, sur la goutte de sang, sans appuyer.



Maintenez cette position sans bouger, ni décoller le tube de la goutte. Massez si nécessaire


Le sang va s'écouler lentement de lui même dans le tube par capillarité et le remplir. Veillez à bien remplir le tube jusqu'au bas des ailettes.

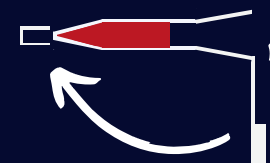

Sceller la partie basse du tube avec l'embout retiré au préalable. Puis fermez le bouchon clapet et remettez la Microviette dans le tube de transport.

Veillez à bien maintenir le tube horizontal pendant toute l'étape précédente sinon votre échantillon risque de se renverser.

Nettoyez le sang à l'aide du coton présent dans le kit hygiène de prélèvement et pansez-vous.

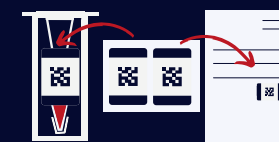

Collez l'une des étiquettes sur le tube et la seconde sur l'attestation que vous remplirez en même temps.

Déposez le tube dans le sachet plastique. Vérifiez que le papier absorbant est toujours présent dans le sachet. Déposez le sachet et l'attestation dans la boîte.

